


Barras de Apoio

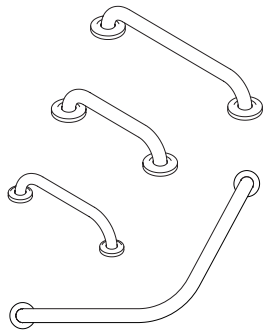

Meber

Recomendações de segurança


Este produto foi projetado de acordo com a norma NBR 9050:2004 e resiste a até 150 kg de peso se instalado adequadamente. Para garantir segurança aos usuários, atente para as recomendações a seguir:

- Instalar as barras de apoio sempre em parede de alvenaria;
- Os furos de fixação deverão ser feitos nas partes maciças dos tijolos, o que garante robustez de fixação e, em consequência, segurança ao usuário;
- As buchas plásticas não devem ser batidas para dentro do furo. Elas deverão permanecer alinhadas à parede, resultando em maior área de fixação, evitando que a rosca do parafuso escorra.

Instrução de Instalação

1. Desencaixe a **canopla** da **barra de apoio**.
2. Marque os furos de fixação na parede conforme a distância da **barra de apoio**.
3. Fure a parede, utilizando uma broca (videa) de 8mm. (Fig.1)

Fig.1

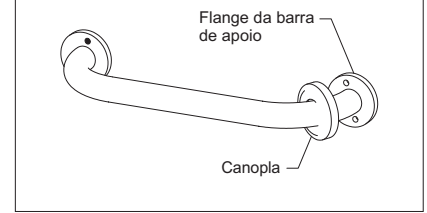

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br


4. Introduza as **buchas de 8mm** nos furos.

5. Insira as **arruelas** nos **parafusos**.

Obs.: A barra de apoio linear 2077 não necessita de arruelas.


6. Posicione a barra de apoio na parede e fixe-a com os **parafusos**. (Fig.2)

Fig.2

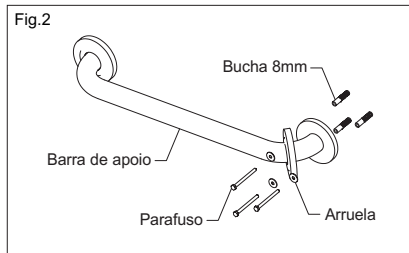

7. Ajuste a **canopla** sobre o **flange da barra de apoio**. (Fig.3)

Fig.3

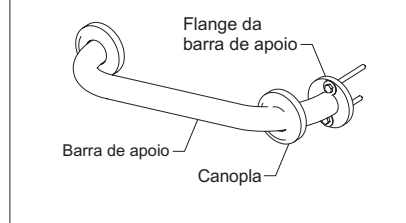

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.